

meo[®] plant



Unser neues Verpackungskonzept

Viele Vorteile zum
gleichen Preis!

- ✓ **Doppelte Sterilbarriere**
5 Jahre Sterilität
- ✓ **Verbessertes Handling**
für Behandler und Assistenz
- ✓ **Direkte Produktentnahme**
mit Eindrehschlüssel
- ✓ **Farbcodiertes Etikett**
Ein Griff zum richtigen
Durchmesser
- ✓ **Versiegelte Umverpackung**
mit praktischer AufreiBlasche

Meoplast Medical

GmbH Deutschland

Malchiner Str. 99

12359 Berlin


Phone +49 (0)30 - 755 277 06

Fax +49 (0)30 - 755 277 05


info@meoplast.de

www.meoplast.de

Die Vorgehensweise – Schritt für Schritt

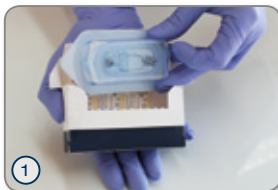

① Umverpackung mittels Aufreißlasche öffnen und Sterilblister entnehmen

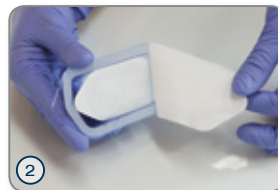

② Tyvek-Folie des Außenblisters abziehen und Innenblister entnehmen



③ Tyvek-Folie des Innenblisters abziehen



④ Eindreh Schlüssel direkt ins Implantat einführen und entnehmen



⑤ Schutzdeckel für Einheitschraube abnehmen



⑥ Einheitschraube mittels Eindreh Schlüssel entnehmen